

Innovative Hygiene.

hagleitner

hygienicDES CAPS

Dezinfekce ploch



CS

Vysoce účinný dezinfekční prostředek ve formě práškového koncentráту ve vodě rozpustné fólii

- Pro každodenní dezinfekci všech typů povrchů
- K čištění a dezinfekci neinvazivních zdravotnických výrobků
- Fólie se rozpustí ve vodě – je 100% bez obsahu mikroplastů
- Kompletní spektrum účinnosti: baktericidní (včetně TBC), sporocidní, levurocidní, fungicidní, virucidní (obalené a neobalené viry)
- Vysoká šetrnost k životnímu prostředí: účinná látka 0,5% kyselina peroctová se po dezinfekci rozloží na ekologicky nezávadné produkty rozpadu (kyslík, voda, ocet)
- Posudek podle nejnovějších kontrolních metod EN (vč. sporocidního účinku v souladu s EN 17126)
- Přihlášeno k zařazení na seznam RKI (A/B) a VAH/ÖGHMP

Výhody hygienicDES CAPS

- Chyby v dávkování jsou vyloučeny – praktické dávkování v samostatných dávkovacích jednotkách
- Bezpečné a bezprašné – bez přímého kontaktu s práškovým koncentrátem
- Pohodlné používání – lze používat na malé i velké plochy
- Krátká doba působení s vynikajícím čisticím účinkem
- 1 dóza hygienicDES CAPS nahrazuje 80 plastových lahví, v porovnání s běžnými, k použití připravenými dezinfekčními prostředky
- Certifikováno jako schválený dezinfekční prostředek pro bio provozy



Ve zdravotnictví

vysoce účinný proti sporotvorným bakteriím (*Clostridium difficile*)



Ve výchovných a vzdělávacích institucích






vysoce účinný proti rotaviřům



V oblasti obecné hygieny

Hotelnictví/gastronomie, (např. noroviry), veřejné prostory, potravinářství

Aplikace

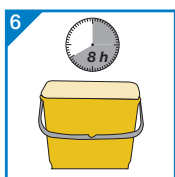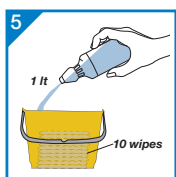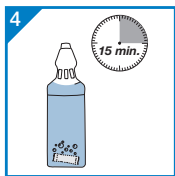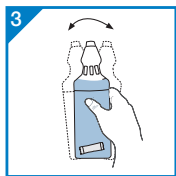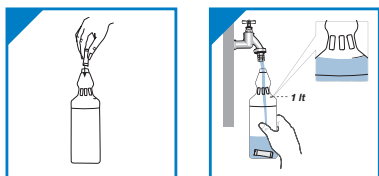

Pro každodenní rutinní dezinfekci, resp. při vypuknutí rotavirových nebo norovirových infekcí postačí 1 CAP na litr.

V případě mimořádného zatížení choroboplodnými zárodky zohledněte tabulku dávkování v datovém listu výrobku. K dezinfekci velkých ploch doporučujeme systém safetyMOP. K dezinfekci malých povrchů používejte dezinfekční prostředek s pěnovou pistolí modrou a nanášejte přímo, rozetřete a nechte krátce působit.

K instruk-
tažnímu videu:



1. Přípravek hygienicDES CAPS dejte do láhve refillBOTTLE
2. Láhev refillBOTTLE doplňte 1 litrem studené vody z vodovodu
3. Protřepejte, aby se přípravek hygienicDES CAPS rozpustil ve vodě
4. Po 15 minutách je dezinfekční roztok připravený k použití
5. 10 utěrek safetyWIPES nechte nasáknout 1 litrem (nebo 20 utěrek safetyWIPES 2 litry) dezinfekčního roztoku v safetyBOXu SMALL. V případě velkých ploch nechte nasáknout 15 safetyMOPů v 5 litrech dezinfekčního roztoku v safetyBOXu.
6. Dezinfekční roztok vydrží připravený k použití po dobu 8 hodin



Tip: Čerstvě připravený dezinfekční roztok je vysoce účinný a snadno se používá v kombinaci s utěrkami Hagleitner safetyWIPES a safetyMOPem

Snášlivost materiálů:

- U hotového aplikačního roztoku hygienicDES CAP byla otestována snášlivost s následujícími materiály: ABS (novodur), POM (hostaform), PP (moplen), PP (novolen), plexisklo, PVC, ABS, PE-HD (hostalen), PA, polysulfon, teflon, linoleová podlaha, kaučuková podlaha, vinylová podlaha, ocel (nerezová ocel)
- Při aplikaci na hliník a barevné kovy je třeba nejprve otestovat snášlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Roztok nedoporučujeme používat na polykarbonát.



hygienicDES CAPS

č. v. 4460101433

80 x 5 g Caps


UDI: 900835090458

Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně.

Před použitím si vždy přečtete etiku a informace o produktu.

CE 0123

Příslušenství:

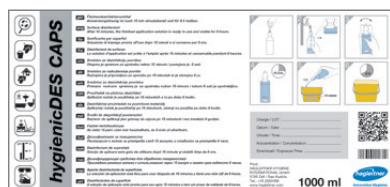

Label hygienicDES CAPS

č. v. 4450703100

refillBOTTLE

č. v. 44507003200



pěnová pistole modrá

č. v. 4450702200



HAGLEITNER HYGIENE ČESKO s.r.o.

Komerční 465, 251 01 Nupaky
Tel. č.: +420 272 680 614
Fax: +420 272 680 617
praha@hagleitner.cz



www.hagleitner.com