

Innovative Hygiene.

hagleitner

## hygienicDES CAPS Felületfertőtlenítés



hu

### Rendkívül hatékony fertőtlenítőszer- por koncentrátum vízdoldható fóliában

- Mindenféle felület napi fertőtlenítésére
- A nem invazív orvostechnikai eszközök tisztításához és fertőtlenítéséhez
- A fólia feloldódik a vízben – 100 %-ban mikroműanyag-mentes
- Teljes hatásspektrum: baktericid (TB is beleértve), sporocid, levurocid, fungicid, virucid (burkos és burok nélküli vírusok)
- Nagyfokú környezeti kompatibilitás: A 0,5%-os per ecetsav hatóanyag a fertőtlenítés után ökológiailag ártalmatlan bomlástermékekre (oxigén, víz, ecet) bomlik le
- A legújabb EN vizsgálati módszerek szerint jóváhagyott (beleértve az EN 17126 szerinti sporociditást is)
- RKI (A/B) és VAH/ÖGHMP jegyzékbe vételre regisztrálva

### A hygienicDES CAPS előnyei

- Adagolási hibák kizárva – Az egyedi adagolóegységeknek köszönhetően gyakorlati adagolás
- Biztonságos és pormentes – nincs közvetlen érintkezés a por koncentrátummal
- Kellemes használat – kis és nagy felületeken is használható
- Rövid hatásidő – kiváló tisztítási teljesítmény mellett
- 1 doboz hygienicDES CAPS a hagyományos, használatra kész szerekkel összevetve 80 műanyag palackot helyettesít
- Tanúsított fertőtlenítőszer a biogazdaságok számára



#### Egészségügy területén

magas hatékonyság spóráképző baktériumok ellen (Clostridium difficile)



#### Az oktatás és nevelés területén





Rendkívül hatékony rotavírusok ellen



#### Általános higiéniai területen

Hotel/gasztronómia (pl. norovírusok) ipar, nyilvános intézmények, ételkészítés terület

## Alkalmazás

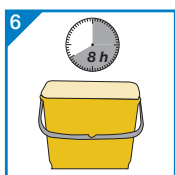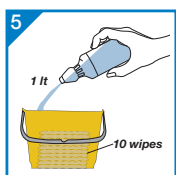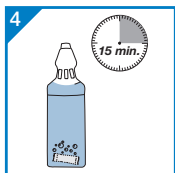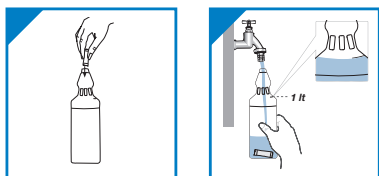

### Napi rutin fertőtlenítéshez ill. rota- vagy norovírusok felszaporodása esetén literenként 1 CAP elegendő.

Speciális csíráterhelés esetén kérjük, vegye figyelembe a termék adatlapján található adagolási táblázatot. Nagy felületek fertőtlenítéséhez a safetyMOP rendszert ajánljuk. Kis felületek fertőtlenítéséhez használjon fertőtlenítőszerrel a habsszórófej kék termékkel, közvetlenül vigye fel, terítse el, majd hagyja rövid ideig hatni.

1. Adagoljon hygienicDES CAPS terméket egy refillBOTTLE palackba
2. Töltse fel a refillBOTTLE terméket 1 liter hideg vezetékes vízzel
3. A vízben történő feloldódáshoz rázza fel a hygienicDES CAPS terméket
4. 15 perc elteltével rendelkezésre áll a kész fertőtlenítő oldat
5. 10 safetyWIPES terméket áztasson be 1 liter (vagy 20 safetyWIPES terméket 2 liter) fertőtlenítő oldatba a safetyBOX SMALL termékben. Nagy felületek esetén áztasson be 15 safetyMOP terméket 5 liter fertőtlenítő oldatba a safetyBOX termékben.
6. A fertőtlenítő oldatot 8 órán keresztül lehet felhasználni

Az alkalmazási videóhoz:



**Tipp:** A frissen elkészített fertőtlenítő oldat rendkívül hatékony és könnyen használható a Hagleitner safetyWIPES és safetyMOP termékekkel

### Anyagkompatibilitás:

- A kész hygienicDES CAPS felhasználását a következő anyagokkal való kompatibilitásra tesztelték: ABS (Novodur), POM (Hostaform), PP (Moplen), PP (Novolen), Plexi, PVC, ABS, PE-HD (Hostalen), PA, poliszulfon, teflon, linóleum padló, gumi padló, vinil padló, acél (rozsdamentes acél)
- Alumíniumon és színesfémen történő alkalmazáskor az anyag kompatibilitását előre meg kell vizsgálni egy észrevétlen helyen.
- Az oldat polikarbonáton történő alkalmazása nem javasolt.



**hygienicDES CAPS**

Cikkszám: 4460101433

80 x 5 g Caps

UDI: 900835090458

Vegyszerrel való érintkezéskor a szokásos óvintézkedéseket tartsa be.

Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban szereplő információkat.

CE 0123

### Tartozék:



**Label hygienicDES CAPS**

Cikkszám: 4450703100



**refillBOTTLE**

Cikkszám: 44507003200



**Habszórófej kék**

Cikkszám: 4450702200

HAGLEITNER HYGIENE MAGYARORSZÁG Kft.

9027 Győr, Juharfa út 20

Tel. +36 (96) 512400

Fax +36 (96) 517831

gyor@hagleitner.hu



[www.hagleitner.com](http://www.hagleitner.com)