

Sanificante concentrato in polvere altamente efficace in pellicola idrosolubile

- Per la sanificazione quotidiana di superfici di qualsiasi tipo
- Per la pulizia e la sanificazione di prodotti medicali non invasivi
- La pellicola si scioglie in acqua ed è priva al 100% di microplastica
- Spettro di azione completo: battericida (compreso TB), sporicida, levurocida, fungicida, virucida (virus avvolti e non avvolti)
- Alta ecocompatibilità: il principio attivo, acido peracetico al 0,5%, si scompone dopo la sanificazione in prodotti di scarto non nocivi per l'ambiente (ossigeno, acqua, aceto)
- Sottoposto a perizia secondo gli attuali metodi di prova EN (incl. gli sporocidi secondo la norma EN 17126)
- Registrazione all'elenco RKI (A/B) e VAH/ÖGHMP richiesta

I vantaggi degli hygienicDES CAPS

- Errori di dosaggio sono esclusi
 Pratico dosaggio grazie a unità di dosaggio singole
- Sicuro e senza polvere nessun contatto diretto con il concentrato in polvere
- Uso piacevole adatto a superfici piccole e grandi
- Tempo di azione breve con eccellente potere pulente
- 1 confezione di hygienicDES CAPS equivale a 80 bottiglie in plastica, rispetto a sanificanti pronti all'uso disponibili in commercio
- Certificato come sanificante omologato per aziende biologiche



Nel settore sanitario

altamente efficace contro batteri che producono spore (Clostridium difficile)



Nel settore dell'istruzione e dell'educazione

altamente efficace contro rotavirus



Nel settore dell'igiene in generale

Settore alberghiero/gastronomia (ad es. norovirus) industria, settori del pubblico, settore alimentare

Applicazione















Per la sanificazione di routine quotidiana o in caso di diffusione di rotavirus o norovirus è sufficiente 1 CAP al litro.

In caso di una contaminazione con germi specifici si prega di considerare la tabella di dosaggio riportata nella scheda tecnica del prodotto. Per la sanificazione di grandi superfici consigliamo il sistema safetyMOP. Per la sanificazione di piccole superfici, usare il sanificante con pistola a schiuma blu e applicare direttamente, distribuire e lasciare agire brevemente.

Vai al video dell'applicazione:



- 1. Aggiungere gli hygienicDES CAPS in una refillBOTTLE
- 2. Rabboccare la refillBOTTLE con 1 litro di acqua di rubinetto fredda
- 3. Far sciogliere gli hygienicDES CAPS nell'acqua agitando
- 4. Dopo 15 minuti la soluzione sanificante pronta all'uso è disponibile
- 5. Impregnare 10 safetyWIPES con 1 litro (o 20 safetyWIPES con 2 litri) di soluzione sanificante nella safetyBOX SMALL. Per grandi superfici, impregnare 15 safetyMOP con 5 litri di soluzione sanificante nella safetyBOX.
- 6. La soluzione sanificante è pronta all'uso per una durata di 8 ore



Consiglio: La soluzione sanificante appena preparata è altamente efficace e di facile uso in combinazione con safetyWIPES e safetyMOP Hagleitner

Compatibilità dei materiali:

- · La soluzione pronta all'uso hygienicDES CAPS è stata testata per la compatibilità con i seguenti materiali: ABS (Novodur), POM (Hostaform), PP (Moplen), PP (Novolen), plexiglas, PVC, ABS, PE-HD (Hostalen), PA, polisulfone, teflon, pavimenti in linoleum, pavimenti in gomma, pavimenti in vinile, acciaio (acciaio inossidabile)
- Se applicata su alluminio e metalli non ferrosi, la compatibilità dei materiali deve essere testata in anticipo in una zona poco visibile.
- Si sconsiglia l'applicazione della soluzione su policarbonato.

hygienicDES CAPS nr. art. 4460101433

80 x 5 g Caps

Usare il sanificante con prudenza. Prima dell'uso leggere sempre le informazioni sul prodotto e l'etichetta.

C E 0123

Accessori:

UDI: 900835090458



Label hygienic DES CAPS

nr. art. 4450703100



refillBOTTLE nr. art. 44507003200



Pistola a schiuma blu nr. art. 4450702200

CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL.

Via Ugo Foscolo 12 20060 Basiano (MI) Tel. +39 02 9500431 Fax +39 02 95760507 milano@hagleitner.it

Via Josef Maria Pernter 9/a. 39044 Egna Tel. +39 0471 052816 Fax +39 0471 052817

egna@hagleitner.it

Josef-Maria-Pernter-Straße 9/a 39044 Neumarkt Tel. +39 0471 052816 Fax +39 0471 052817 neumarkt@hagleitner.it

