



hygienicDES CAPS FLÄCHENDESINFEKTION

ger

Hochwirksames Desinfektionsmittel-Pulverkonzentrat in wasserlöslicher Folie

- Für die tägliche Desinfektion von Flächen aller Art
- Folie löst sich im Wasser auf – 100 % frei von Mikroplastik
- Lückenloses Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. TB), sporozid, levurozid, fungizid, viruzid (be-
hüllte und unbehüllte Viren)
- Desinfektionswirkung auf Basis von Peressigsäure (0,5 %)
- Nach neuesten EN-Prüfmethoden umfangreich begutachtet
- Zur RKI (A/B) und VAH/ÖGHMP Listung angemeldet

Vorteile der hygienicDES CAPS

- Dosierfehler sind ausgeschlossen – Praktische Dosierung durch einzelne Dosiereinheiten
- Sicher und staubfrei – kein direkter Kontakt zum Pulverkonzentrat
- Angenehm im Gebrauch – auf kleinen und großen Flächen verwendbar
- Kurze Einwirkzeit – bei hervorragender Reinigungsleistung
- Wirkstoff zerfällt nach der Anwendung – keine schädlichen Rückstände
- Hohe Umweltverträglichkeit – frei von Aldehyden, Phenolen, Chlorabspaltern



Tipp: hygienicDES CAPS sind hervorragend geeignet in Kombination mit den HAGLEITNER safety Produkten: safetyWIPES, safetyMOP, safetyBOX, safetyBOX SMALL

Im Gesundheitsbereich

hochwirksam gegen sporenbildende Bakterien (Clostridium difficile)

Im Bildungs- und Erziehungsbereich


hochwirksam gegen Rotaviren

Im allgemeinen Hygienebereich

Hotellerie/Gastronomie (z.B. Noroviren)
Industrie, öffentliche Bereiche



Anwendung

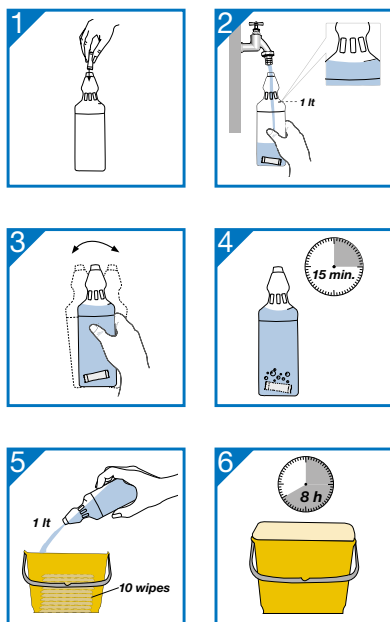

Für die tägliche Routinedesinfektion bzw. bei Ausbruch von Rota- oder Noroviren genügt 1 CAP pro Liter.

Bei spezieller Keimbelastung bitte die Dosiertabelle berücksichtigen. Für die Desinfektion von großen Flächen empfehlen wir das safetyMOP System.

1. hygienicDES CAPS in eine HAGLEITNER systemFLASCHE geben
2. systemFLASCHE mit 1 Liter kaltem Leitungswasser auffüllen
3. hygienicDES CAPS durch Schütteln im Wasser auflösen
4. Nach 15 Minuten steht die fertige Desinfektionslösung zur Verfügung
5. 10 safetyWIPES mit 1 Liter (oder 20 safetyWIPES mit 2 Liter) Desinfektionslösung in der safetyBOX SMALL tränken. Bei großen Flächen 15 safetyMOPs mit 5 Liter Desinfektionslösung in der safetyBOX tränken.
6. Die Desinfektionslösung ist für 8 Stunden haltbar und einsatzbereit

Dosiertabelle

Prüfnorm	Dosierung	Zeit	Keim
EN 13697	1 CAP/L	5 Min	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa
EN 13727	1 CAP/L	5 Min	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli
EN 16615	1 CAP/L	5 Min	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans
EN 13697	1 CAP/L	5 Min	Enterococcus hirae, Candida albicans
EN 13624	2 CAP/L	15 Min	Candida albicans
EN 14348	4 CAP/L	30 Min	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium
EN 14348	2 CAP/L	120 Min	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium
EN 17126	4 CAP/L	15 Min	Clostridium difficile
EN 17126	2 CAP/L	30 Min	Clostridium difficile
EN 17126	1 CAP/L	60 Min	Clostridium difficile
EN 13704	1 CAP/L	20 Min	Clostridium difficile, Bacillus subtilis
EN 14476	1 CAP/L	5 Min	Adenovirus, Rotaviren, Noroviren (MNV)
EN 14476	2 CAP/L	30 Min	Poliovirus
EN 14476	2 CAP/L	5 Min	Polyomavirus SV40
EN 14476	1 CAP/L	15 Min	Polyomavirus SV40
EN 13697	4 CAP/L	15 Min	Aspergillus brasiliensis
EN 13624	2 CAP/L	30 Min	Aspergillus brasiliensis
EN 16615	2 CAP/L	60 Min	Aspergillus brasiliensis

Bei Anwendung auf Aluminium sowie Buntmetallen sollte die Materialverträglichkeit vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Die Lösung darf nicht auf Polycarbonat angewendet werden.



hygienicDES CAPS

Art.-Nr. 4460101333

Peressigsäure:
350 PPM

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
informationen lesen.*

**HAGLEITNER HYGIENE
ÖSTERREICH GmbH**
Lunastraße 5,
5700 Zell am See
Tel. +43 (0)5 0456
Fax +43 (0)5 0456 7777
office@hagleitner.at

**HAGLEITNER HYGIENE
DEUTSCHLAND GmbH**
Robert-Bosch-Str. 12,
82054 Sauerlach b. München
Tel. +49 (0)8104 629580
Fax +49 (0)8104 629680
sauerlach@hagleitner.de

**CARTEMANI HAGLEITNER
GROUP S.r.l.**
Josef Maria Pernter Straße 9/a
39044 Neumarkt, Italien
Tel. +49 (0)8104 629580
Fax +49 (0)8104 629680
neumarkt@hagleitner.it



www.hagleitner.com

Art.-Nr. 20703292000