



hygienicDES CAPS

DEZINFEKCIJA POVRŠINE

srb

Visoko efikasan koncentrat praška za dezinfekciju u filmu rastvorljivom u vodi

- Za svakodnevnu dezinfekciju površina svih vrsta
- Film se rastvara u vodi - 100% bez mikroplastike
- Kompletni spektar delovanja: baktericidni (uključujući tuberkulozu), sporocidni, kvasac, fungicidni, virucidni (virus sa omotanom i bez omotača)
- Dezinfekcijski efekat na bazi peracetne kiseline (0,5%)
- Opsežno se procenjuje u skladu sa najnovijim EN metodama ispitivanja
- Registrovani na listu RKI (A/B) i VAH/ÖGHMP

Prednosti hygienicDES CAPS

- Greške u doziranju su isključene - Praktično doziranje kroz pojedinačne jedinice doziranja
- Siguran i bez prašine - nema direktnog kontakta sa koncentratom praška
- Udobne u upotrebi - mogu se koristiti na malim i velikim površinama
- Kratko vreme izlaganja - sa odličnim performansama čišćenja
- Nakon upotrebe aktivni sastojak se razgrađuje - bez štetnih ostataka
- Visoka kompatibilnost sa životnom sredinom - bez aldehida, fenola, separatora hlora



Savet: hygienicDES CAPS izvrsno se slažu u kombinaciji s HAGLEITNER-ovim sigurnosnim proizvodima: safetyWIPES, safetyMOP, safetyBOX, safetyBOX SMALL

U zdravstvenom sektoru

visoko efikasno protiv bakterija koje stvaraju spore (*Clostridium difficile*)

U obrazovnom sektoru


visoko efikasno protiv Rotavirusa

U oblasti opšte higijene

Ugostiteljstvo / gastronomija (npr. Norovirusi) industrija, javne oblasti



Aplikacija

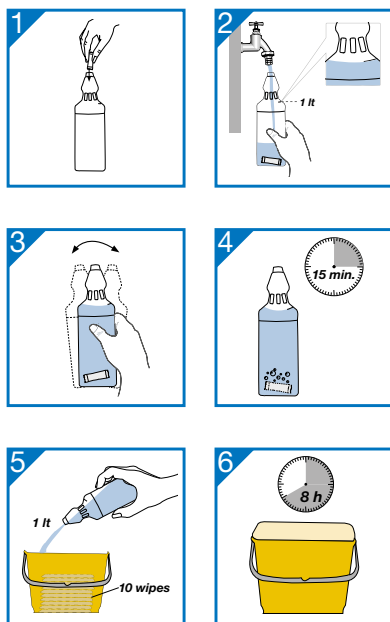

Za svakodnevnu rutinsku dezinfekciju ili na izbijanju rota ili Norovirusima će biti dovoljno 1 CAP po litri.

Za posebno opterećenje klica, molimo Vas da uzmete u obzir tablicu doziranja. Za dezinfekciju velikih površina preporučujemo safetyMOP System.

1. hygienicDES CAPS stavite u HAGLEITNER sistemsku BOCA
2. sistemsku BOCA napunite sa 1 litrom hladne vode iz slavine
3. hygienicDES CAPS otopite mućkanjem u vodi
4. Nakon 15 minuta, dostupan je gotov rastvor za dezinfekciju
5. 10 safetyWIPES sa 1 litrom (ili 20 safetyWIPES sa 2 litre) namočite u rastvor za dezinfekciju u safetyBOX SMALL. Za velike površine natopite 15 safetyMOPs sa 5 litara dezinfekcionog rastvora u safetyBOX- u
6. Rastvor za dezinfekciju je stabilan 8 sati i spreman za upotrebu

Doziranje

Metoda ispitivanja	Doziranje	Vreme	Klica
EN 13697	1 CAP/L	5 min.	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa
EN 13727	1 CAP/L	5 min.	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli
EN 16615	1 CAP/L	5 min.	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans
EN 13697	1 CAP/L	5 min.	Enterococcus hirae, Candida albicans
EN 13624	2 CAP/L	15 min.	Candida albicans
EN 14348	4 CAP/L	30 min.	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium
EN 14348	2 CAP/L	120 min.	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium
EN 17126	4 CAP/L	15 min.	Clostridium difficile
EN 17126	2 CAP/L	30 min.	Clostridium difficile
EN 17126	1 CAP/L	60 min.	Clostridium difficile
EN 13704	1 CAP/L	20 min.	Clostridium difficile, Bacillus subtilis
EN 14476	1 CAP/L	5 min.	Adenovirus, Rotavirus, Norovirus (MNV)
EN 14476	2 CAP/L	30 min.	Poliovirus
EN 14476	2 CAP/L	5 min.	Polyomavirus SV40
EN 14476	1 CAP/L	15 min.	Polyomavirus SV40
EN 13697	4 CAP/L	15 min.	Aspergillus brasiliensis
EN 13624	2 CAP/L	30 min.	Aspergillus brasiliensis
EN 16615	2 CAP/L	60 min.	Aspergillus brasiliensis

Kada se primenjuje na aluminijum i obojene metale, kompatibilnost materijala treba unapred testirati na neupadljivom mestu. Rastvor se ne sme nanositi na polikarbonat.



hygienicDES CAPS

Br. art. 4460101333

Persirćetna kiselina:
350 PPM

*Pažljivo koristite dezinfekciona sredstva.
Pre upotrebe uvek pročitajte informacije
o proizvodu na etiketi.*

HAGLEITNER HYGIENE
SRBIJA d.o.o.
Joze Laurenčića 14
11283 Beograd-Zemun
Srbija
Tel.: +381 11 4142770
beograd@hagleitner.rs

HAGLEITNER HYGIENE
BiH d.o.o.
Ul. Kninska bb
74400 Derventa
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 53 315 048
Fax: +387 53 315 096
derventa@hagleitner.ba



www.hagleitner.com