



## hygienicDES CAPS

DEZINFEKCIJA POVRŠIN

slv

### Visoko učinkovito razkuževalno sredstvo - koncentrat v prahu v foliji, ki se topi v vodi

- Za vsakodnevno razkuževanje površin vseh vrst
- Folija se v vodi raztopi - 100% brez mikroplastike
- Popoln spekter delovanja: baktericidno (vključno s TB), sporocidno, levurocidno, fungicidno, virucidno (virusi z ovojnico in brez ovoja)
- Učinek razkuževanja, ki temelji na perocetni kislini (0,5%)
- Ocenjeno v skladu z najnovejšimi testnimi metodami po EN
- Prijavljeno na seznam za RKI (A/B) in VAH/ÖGHMP

### Prednosti hygienicDES CAPS

- Napake pri doziranju so izključene - priročno doziranje zaradi posamezno odmerjene enote
- Varno in brez prahu - brez neposrednega stika s praškastim koncentratom
- Udobna uporaba - uporabno na majhnih in velikih površinah
- Kratek čas učinkovanja - z odličnimi učinki čiščenja
- Aktivna sestavina se po uporabi razgradi - brez škodljivih ostankov
- Visoka okoljska neoporečnost - brez aldehydov, fenolov, raznih oblik klora



Namig: hygienicDES CAPS se odlično ujemajo s HAGLEITNER safety izdelki: safetyWIPES, safetyMOP, safetyBOX, safetyBOX SMALL

#### Na področju zdravstva

zelo učinkovito proti bakterijam, ki tvorijo spore (*Clostridium difficile*)

#### Na področju vzgoje in izobraževanja


zelo učinkovito proti rotavirusom

#### Na področju splošne higiene

Hotelirstvo / gastronomija (napr. norovirusi)



## Uporaba

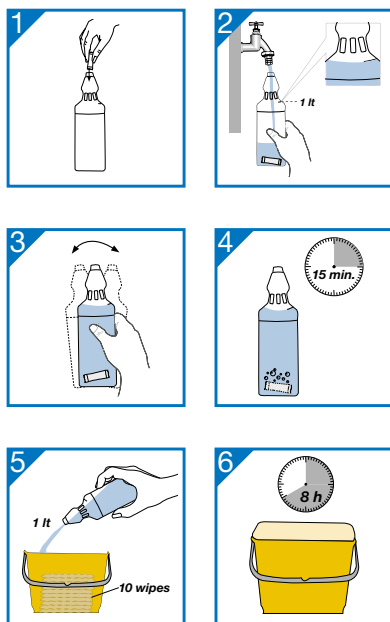

**Za redno vsakodnevno vzdrževanje oziroma ob izbruhu rotavirusa ali norovirusa je dovolj 1 CUP na liter.**

Pri posebej veliki obremenitvi s klicami, upoštevajte tabelo za odmerjanje. Za razkuževanje večjih površin priporočamo safetyMOP sistem.

1. hygienicDES CAPS položite v HAGLEITNER sistemsko plastenko
2. Sistemsko plastenko napolnite z 1 l mrzle vode iz pipe
3. hygienicDES CAPS s tresenjem raztopite v vodi
4. Čez 15 minut je pripravljena mešanica za razkuževanje primerna za uporabo
5. Namočite 10 safetyWIPES v en liter (ali 20 safetyWIPES v 2 litra) raztopine za razkuževanje v safetyBOX SMALL. Pri velikih površinah namočite 15 safetyMOP v 5 litrov razkuževalne raztopine v safetyBOX
6. Raztopina za razkuževanje je za uporabo primerna 8 ur

## Doziranje

Testna metoda	Doziranje	Čas	Klica
EN 13697	1 CAP/L	5 min	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa
EN 13727	1 CAP/L	5 min	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli
EN 16615	1 CAP/L	5 min	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans
EN 13697	1 CAP/L	5 min	Enterococcus hirae, Candida albicans
EN 13624	2 CAP/L	15 min	Candida albicans
EN 14348	4 CAP/L	30 min	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium
EN 14348	2 CAP/L	120 min	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium
EN 17126	4 CAP/L	15 min	Clostridium difficile
EN 17126	2 CAP/L	30 min	Clostridium difficile
EN 17126	1 CAP/L	60 min	Clostridium difficile
EN 13704	1 CAP/L	20 min	Clostridium difficile, Bacillus subtilis
EN 14476	1 CAP/L	5 min	Adenovirus, Rotavirus, Norovirus (MNV)
EN 14476	2 CAP/L	30 min	Poliovirus
EN 14476	2 CAP/L	5 min	Polyomavirus SV40
EN 14476	1 CAP/L	15 min	Polyomavirus SV40
EN 13697	4 CAP/L	15 min	Aspergillus brasiliensis
EN 13624	2 CAP/L	30 min	Aspergillus brasiliensis
EN 16615	2 CAP/L	60 min	Aspergillus brasiliensis

Pri nanašanju na aluminij in barvne kovine je potrebno preizkusiti združljivost materialov na neopaznem mestu. Raztopine ne smete nanesti na polikarbonat.



**hygienicDES CAPS**

Št. art. 4460101333

**Perocetna kislina:**  
350 PPM

Razkuževalno sredstvo uporabljajte previdno. Pred uporabo preberite etiketo in informacije o izdelku.

**HAGLEITNER HYGIENE**

d.o.o.

Potok pri Komendi 13

1218 Komenda

Tel. +386 (0)1 8343468

Fax +386 (0)1 8343469

komenda@hagleitner.si



Št. art. 20703297000

[www.hagleitner.com](http://www.hagleitner.com)